

AROSHA

LX9



EN ISO 13485



DS MAREF
DAESUNG MAREF CO.,LTD.

Mode d'emploi

FR

index

| | |
|--|-----------|
| 1. Instructions | 3 |
| 1.1 Introduction | 3 |
| 1.2 Guide des indications | 3 |
| 2. Informations sur la sécurité | 4 |
| 2.1 Sécurité électrique | 4 |
| 2.2 Concerne : Manchons à air | 5 |
| 2.3 Avertissements | 6 |
| 2.4 Utilisation et maintenance | 7 |
| 2.5 Nettoyage et autres | 7 |
| 3. Description de l'appareil | 8 |
| 3.1 Caractéristiques | 9 |
| 3.2 Clause 5 | 9 |
| 4. Description du produit Accessoires | 10 |
| 4.1 Basic set & Drainage set | 10 |
| 5. Mode d'emploi Appareil | 11 |
| 5.1 Caractéristiques spéciales | 11 |
| 5.2 Instructions pour une première utilisation | 11 |
| 5.3 Pour paramétrer la pression, la durée et le temps d'intervalle | 12 |
| 5.4 Pour configurer le mode opératoire | 13 |
| 5.5 Pour configurer le mode de soins en option | 14 |
| 5.6 Raccorder l'embout du tuyau à la prise d'air | 14 |
| 5.7 Raccorder les tuyaux à un manchon | 14 |
| 6. Mode d'emploi Manchons à air | 15 |
| 6.1 Comment utiliser les manchons | 15 |
| 6.2 Comment utiliser le manchon pour l'abdomen | 16 |
| 7. Reference | 17 |
| 7.1 Informations concernant les interférences électromagnétiques ou autres | 17 |
| 7.2 Marquage WEEE | 18 |
| 7.3 Conditions environnementales pour le transport et le stockage | 18 |
| 7.4 Arrêt de l'appareil en cours de fonctionnement | 19 |
| 7.5 Recommandations | 19 |
| 8. Auto-contrôle pour utiliser l'appareil | 20 |
| 9. Garantie | 21 |
| 10. Protocole d'application | 22 |

1.1 Introduction





Merci d'avoir acheté notre appareil. Cet appareil est un appareil thérapeutique à compression par air destiné à améliorer la circulation sanguine du corps humain. Le patient peut également acheter cet appareil ou l'utiliser personnellement après avoir suivi les instructions du médecin.

Le principe de fonctionnement est que l'air provenant de l'appareil de contrôle sera insufflé dans le manchon par le biais de 4 chambres à air et l'air pressurise de façon séquentielle les chambres en commençant par la première et en terminant par la quatrième.

Ce manuel d'utilisation contient les informations à savoir pour utiliser l'appareil, à effectuer sa maintenance et à le réparer. Veuillez bien lire ce manuel afin d'utiliser correctement l'appareil et afin qu'il n'y ait pas de dysfonctionnements.

Veuillez conserver ce manuel avec l'appareil et ne jamais hésiter de le lire afin d'utiliser correctement l'appareil.

1.2 Guide des indications

| | |
|---|---|
|  Attention | Si les instructions ne sont pas suivies, risque de blessure ou de mauvais fonctionnement. |
|  Avertissement | En cas de non respect des instructions, risque mortel ou grave blessure. |
|  Interdiction | Ce qu'il est interdit de faire. |
|  Interdiction de démonter | Ne pas démonter l'appareil. |

2. Informations sur la sécurité

2.1 Sécurité électrique



Interdiction

- Veuillez utiliser un cordon adapté à la réglementation de votre pays (risque d'incendie ou de chocs électriques).
- Si vous percevez une odeur anormale lorsque l'appareil est en fonctionnement, veuillez immédiatement arrêter de l'utiliser. Dans ce cas, coupez l'alimentation électrique et retirez la fiche électrique. Puis appelez le service après-vente (risque d'accidents et de chocs électriques).
- Bien saisir la fiche avec les mains et non le cordon d'alimentation lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'appareil avec des mains humides (risque d'électrocution).
- Ne pliez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation (risque d'incendie ou de chocs électriques).
- Ne touchez aucune prise ou connecteur en même temps que le patient.
- **L'équipement externe destiné à être raccordé à l'appareil (entrée, sortie ou autres connecteurs) doit être conforme aux normes de la CEI standard (par exemple, IEC 60950 pour les équipements informatiques ou IEC 60601-1 pour l'équipement électrique médical) En outre, toutes les combinaisons d'appareils doivent être conformes à la norme IEC 60601-1 ou harmonisée.**



Attention

- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsqu'il y a de l'orage et des éclairs.

2.2 Concerne : Manchons à air



Interdiction

- Ne pas utiliser les manchons à air sur un corps nu. Utilisez les manchons sur des vêtements légers (La durée de vie des manchons peut être raccourcie à cause de la sueur, des cosmétiques ou du sébum).
- N'utilisez aucun autre accessoire que ceux fournis avec l'appareil pour insuffler de l'air dans les manchons.
- Ne pas tacher les manchons avec de l'essence, du pétrole, du benzène, de l'alcool (Réduction de la durée de vie des manchons).



Attention

- Ne pas utiliser ces manchons avec des accessoires, montres, etc. (risque de dommages physiques, risque de déchirer le manchon).
- Ne pas laisser les manchons à proximité d'appareils chauffants tels que poêle, cigarettes, etc. (risque de fuites d'air ou d'incendie).
- Ne pas laisser les manchons à proximité d'instruments dangereux et contondants tels que aiguilles, ciseaux (Les manchons peuvent être endommagés. Risque de mauvais fonctionnement).

2.3 Avertissements



Interdiction

- Il est interdit d'utiliser l'appareil sous l'influence d'alcool.



Avertissement

- Il est interdit aux enfants d'utiliser l'appareil. Des blessures graves peuvent être occasionnées lorsque l'air est insufflé dans les manchons.

- Ne pas utiliser le tuyau d'air sur le nez, la bouche ou les oreilles (risque de blessures).

- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de port de coeur artificiel.

- Utilisez les manchons sur des vêtements légers.

- Fermez correctement la fermeture éclair des manchons, car une fermeture éclair non fermée peut abîmer la peau en cas de fonctionnement de l'appareil.

- Il est interdit d'utiliser l'appareil sur des patients ayants des greffes ou prothèses dans le corps tels que articulation artificielle, prothèse métallique, silicone, etc. (Risque d'inflammations ou de tout autre effet indésirable).




- **Dans les cas suivants, n'utilisez l'appareil qu'après avoir obtenu l'accord de votre médecin : oedème lymphatique, problèmes veineux, maladies de coeur, maladies vasculaires, patients sous traitement anticancéreux, gangrène, greffe de peau récente ou thrombose veineuse profonde.**

- Dans les cas suivants, n'utilisez l'appareil qu'après avoir obtenu l'accord de votre médecin : maladies de coeur, hypertension, tumeurs malignes, inflammation de la peau, fièvre élevée ou hyposthénie, patients ayant n'importe quelle maladie.




- Cessez d'utiliser l'appareil lorsque vous ne vous sentez pas bien pendant son utilisation et consultez un médecin.

- Utilisez l'appareil suivant les conseils d'un médecin dans les cas suivants : patient ayant subi une intervention chirurgicale, en particulier des organes internes, chirurgie des nerfs ou du cerveau ou patient ayant subi une intervention chirurgicale de moins d'un an.

2.4 Utilisation et maintenance

| | |
|--|---|
|  <p>Interdiction</p> | <ul style="list-style-type: none">- Utiliser l'appareil uniquement en intérieur (0 à 40° C)(Dans le cas contraire, il y a risque de mal-fonctions et d'incendie)- Ne pas utiliser ou garder l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou en contact direct avec le soleil (risques de pannes, d'incendie ou de déformations)- Tenir l'appareil l'hors de portée des enfants. |
|  <p>Avertissement</p> | <ul style="list-style-type: none">- Ne pas utiliser l'appareil à un endroit trop humide (salle de bains, saunas, etc.). (Risque d'incendie et de chocs électriques) |
|  <p>Attention</p> | <ul style="list-style-type: none">- Conservez l'appareil à l'horizontale (s'il est penché, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement). |

2.5 Nettoyage et autres

| | |
|--|---|
|  <p>Interdiction</p> | <ul style="list-style-type: none">- Ne pas utiliser d'huile, de benzène, d'alcool, d'essence ou de produits chimiques pour le nettoyage de l'appareil. (Utiliser des serviettes sèches).- Ne pas utiliser d'huile, de benzène, d'alcool, d'essence, de produits chimiques pour le nettoyage des manches à air (Utiliser des serviettes mouillées). |
|  <p>Avertissement</p> | <ul style="list-style-type: none">- Faites attention de ne pas laisser tomber des agrafes, des trombones, des aiguilles, des objets métalliques ou des aliments dans l'appareil (risque de court-circuits ou de surchauffe). Si cela arrivait, contacter votre service après vente. |
|  <p>Attention</p> | <ul style="list-style-type: none">- Ne pas réparer ou démonter l'appareil (risques d'incendie ou de chocs électriques). |

3. Description de l'appareil

Bouton de contrôle de la vitesse

S'affiche pour indiquer la vitesse de fonctionnement.

Bouton de contrôle du temps

S'affiche pour indiquer la durée d'utilisation.

Bouton de contrôle de la pression

S'affiche pour indiquer l'intensité de la pression en cours de fonctionnement.

Bouton tactile en option / affichage

Bouton pour sélectionner ou supprimer la chambre. Doit être actionné.

pression en cours de fonctionnement. Modes de compression / écran digital

Bouton pour configurer le mode de fonctionnement (A, B, C ou D)



Bouton de commande

Bouton pour régler la pression, la durée, la vitesse.

Bouton marche / arrêt

Bouton activant la marche ou l'arrêt du compresseur après configuration des options.

Bouton on/off (arrêt/marche)

Bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

3.1 Caractéristiques



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Puissance | AC 230V, 50/60 Hz | Poids de l'appareil | 2 kg (6,5 kg avec son emballage) |
| Temps | 5 à 90 min. | Dimensions de l'appareil | 260 × 160 × 120mm |
| Pression | 10 à 180 mmHg plus ou moins 20 mmHg | Alimentation | 50VA |

3.2 Clause 5

1. Type de protection contre les chocs électriques : classe II.
2. Degré de protection contre les chocs électriques : non classifié – pièces utilisées BF.
3. Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration de l'eau : IPX0, équipement ordinaire.
4. Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation en présence d'anesthésiques inflammables ou d'oxygène.
5. Mode de fonctionnement : fonctionnement en continu.

4. Description du produit | Accessoires

4.1 basic set & drainage set

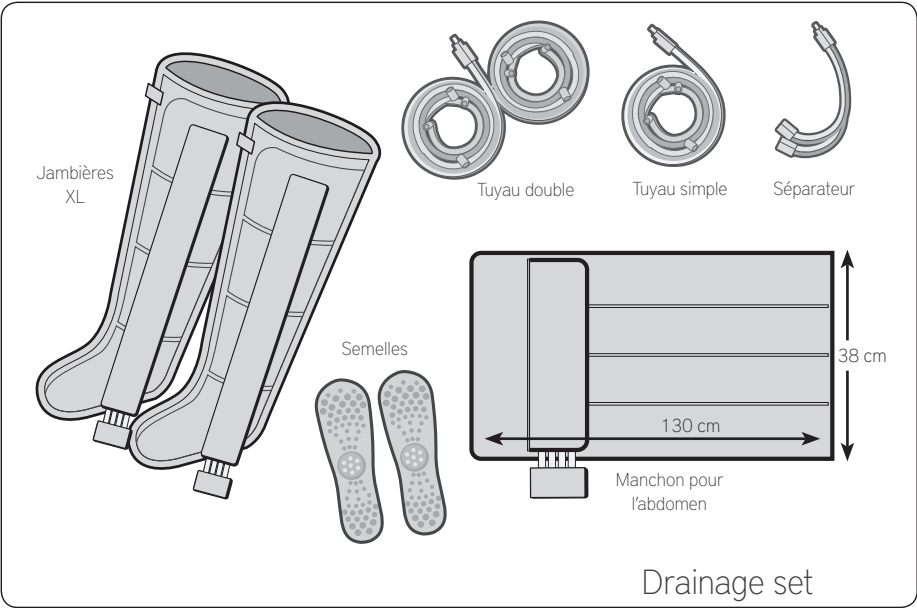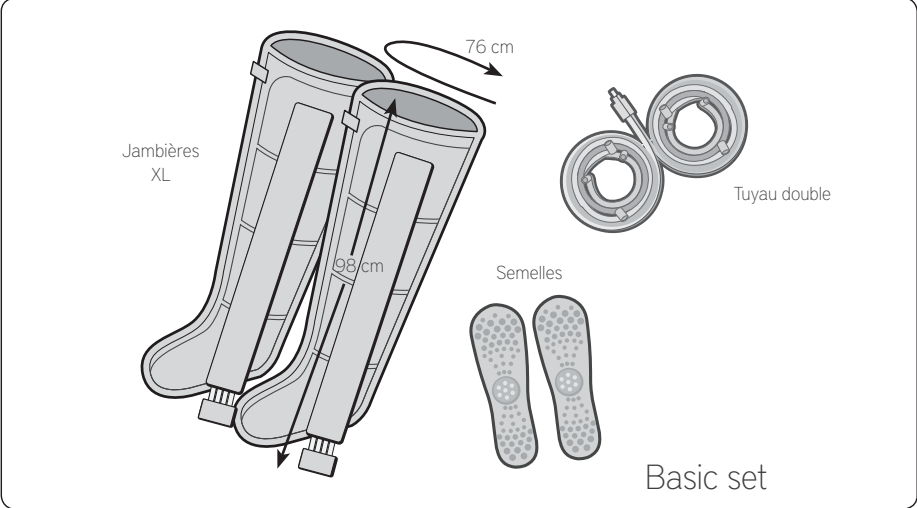

5.1 Caractéristiques spéciales

1. 4 modes sélectifs

Il y a 4 modes de fonctionnement que vous pouvez sélectionner (A, B, C, D)

2. Mode de soin en option

Un utilisateur peut choisir n'importe quelle chambre à partir de laquelle il veut commencer le massage ou sauter une zone où il y a une blessure.

3. Vitesse

Un utilisateur peut configurer la vitesse de gonflage des 4 chambres en choisissant de 1 à 6.

4. E cran tactile / Boutons de réglage

Un utilisateur peut configurer les modes de fonctionnement ainsi que les modes optionnels de soins en touchant à peine l'écran.

5. Capteur de pression numérique

Le capteur de pression numérique calcule continuellement la pression sans tenir compte de la corpulence des patients.

6. Minuterie numérique

Grâce à l'horloge numérique, l'utilisateur peut régler l'heure de façon précise et pratique.

7. Fonction de sécurité

L'air sera évacué automatiquement en cas de panne de courant.

8. Bouton de commande

Bouton pour régler la pression, l'heure et l'intervalle de temps.

Instructions pour une première utilisation

5.2 Instructions pour une première utilisation

1. Pour le réglage de la pression

À la première utilisation, l'utilisation du compresseur à une haute pression risque de causer un dommage physique. Essayez le compresseur à la pression la plus basse de 20 – 30 mmHg, puis augmentez progressivement la pression.

2. Pour l'utilisation des jambières


Étirez la jambe après avoir passé la jambière. Vous pouvez ressentir une certaine douleur autour du genou si vous ne le faites pas.

3. Pour utiliser le manchon pour l'abdomen

Enveloppez correctement dans le manchon une partie de l'abdomen, la taille, les hanches ou les cuisses qui vous désirez traiter. Des douleurs peuvent être causées dans l'abdomen si on enveloppe le manchon jusqu'à la taille seulement.

5.3 Pour paramétrer la pression, la durée et le temps d'intervalle


- La pression est réglable de 10 à 180 mmHg.
- La durée de la séance est réglable de 5 à 90 minutes.
- La vitesse de gonflement est réglable de 1 à 6 mL/s.

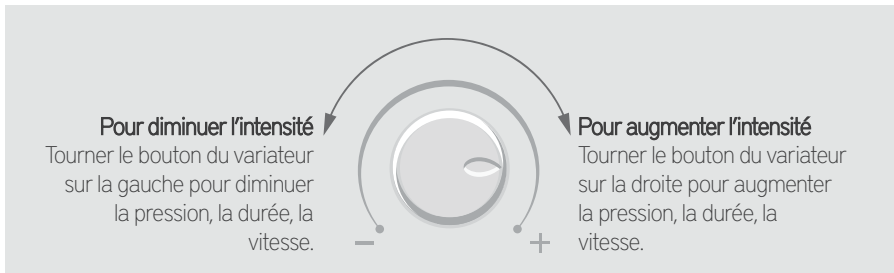



- Le capteur de pression perçoit la pression qui a été réglée automatiquement et pressurise la chambre suivante.
- Vérifier la fuite d'air si la pression est plus faible que la pression standard.
- Au cas où un manchon aurait une fuite d'air ou si le tuyau n'est plus branché à l'embout, le capteur pressurise environ 90 secondes, puis passe au canal suivant.
- Un débutant doit commencer à utiliser le compresseur avec la pression la plus basse, puis contrôler la pression en fonction de sa condition physique.

5.4 Pour configurer le mode opératoire


Le compresseur dispose de 4 modes de fonctionnement.

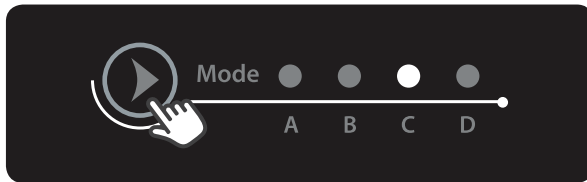

Appuyez sur le mode que vous souhaitez utiliser.

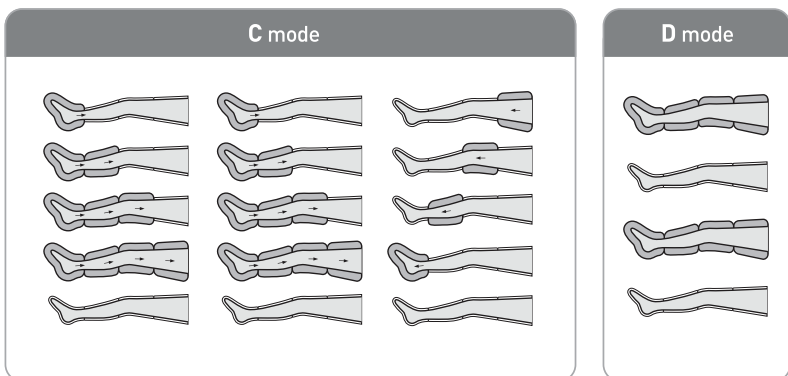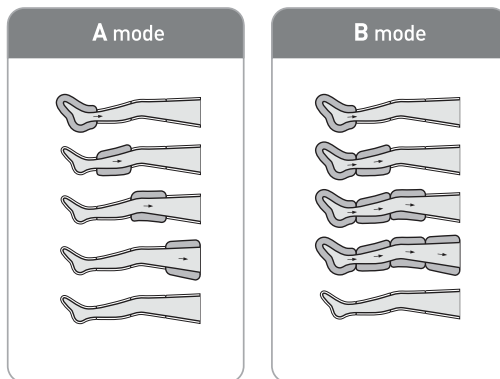

5.5 Pour configurer le mode de soins en option

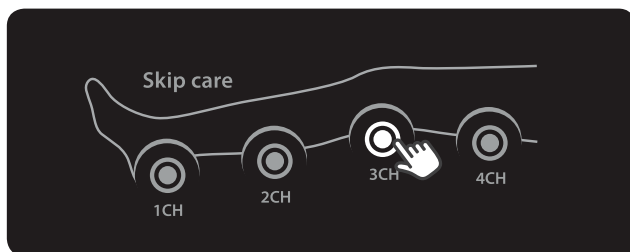

Le mode de soin optionnel vous permet de choisir n'importe quelle chambre pour faire un massage. Non seulement on peut configurer chaque mode de A à D, mais on peut également effectuer un paramétrage en cours de fonctionnement.

5.6 Raccorder l'embout du tuyau à la prise d'air



- Enfoncer l'embout du tuyau dans la prise d'air, comme indiqué sur la photo.
- Enfoncer le bien à fond pour éviter toute fuite d'air.

5.7 Raccorder les tuyaux à un manchon

Raccorder les tuyaux aux embouts de la même couleur.
Si non, il n'y aura aucun effet produit par le changement de séquence de pressurisation.

*Séquence de pressurisation


- Jambière : pied >> mollet >> genou >> cuisse
- Manchon de l'abdomen : abdomen >> taille >> pelvis >> hanches

6. Mode d'emploi | Manchons à air

6.1 Comment utiliser les manchons

Utilisation d'un manchon

- Installez l'accessoire correctement et connectez-le à l'unité de commande au moyen du câble de connexion simple.

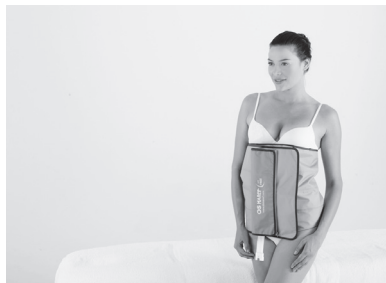

Utilisation simultanée de deux manchons

- Installez les deux accessoires correctement et connectez-les à l'unité de commande au moyen du câble de connexion double.
- Vérifiez les connecteurs afin de garantir une connexion correcte.



Utilisation simultanée de trois accessoires manchons


- Installez les trois accessoires correctement et connectez-les à l'unité de commande au moyen du câble de distribution avec les câbles de connexion simple et double.
- Vérifiez les connecteurs afin de garantir une connexion correcte.



6.2 Comment utiliser le manchon pour l'abdomen

1. Installation

Pour le bon fonctionnement de la ceinture, veillez à ce qu'elle soit placée de façon centrée autour des hanches. Ce n'est que de cette manière qu'une compression correcte est garantie.

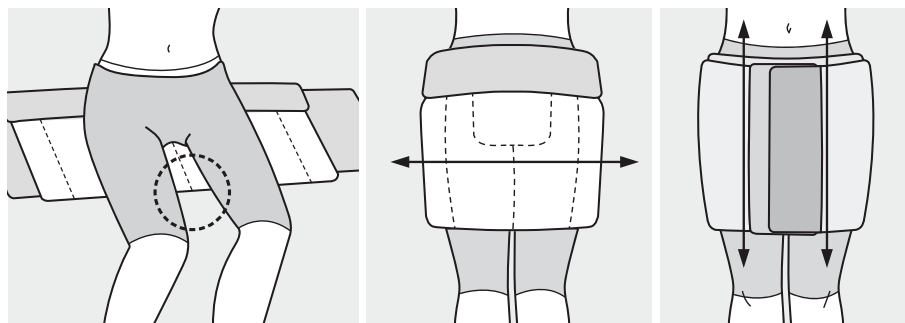

Vérifier que le centre du manchon soit bien placé au milieu des hanches.

Vérifier qu'il est placé de manière symétrique sur le côté du bassin pour améliorer son impact.

2. Connexion

Après avoir installé l'accessoire, connectez-le au câble de connexion simple.

3. Fonctionnement

Lors de la première utilisation, sélectionnez une plage de pression inférieure à 30 mmHg et augmentez la pression progressivement.

7.1 Informations concernant les interférences électromagnétiques ou autres

AROSHA LX9 été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils médicaux dans le cadre de la norme IEC/EN 60601-1-2. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation médicale standard.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences avec d'autres appareils situés à proximité. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles sur d'autres appareils, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'appareil récepteur.
- Augmenter la distance entre les appareils.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel sont reliés les autres appareils.
- Consulter le fabricant ou un technicien du service après vente.

7.2 Marquage WEEE



Ce symbole sur ce produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers lorsqu'il arrive en fin de vie.

Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine causé par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez séparer cet appareil des autres types de déchets et le recycler de façon responsable pour promouvoir la gestion durable des ressources matérielles.

Les particuliers, s'ils ont acheté ce produit, sont invités à se mettre en rapport avec leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent le faire recycler.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les éléments et les conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux.

7.3 Conditions environnementales pour le transport et le stockage

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Conditions d'utilisation | Température (°C) | 0 à 40 |
| | Humidité relative (%) | 10 à 90 |
| | Pression atmosphérique (hPa) | 700 à 1060 |
| Conditions de transport et de stockage | Température (°C) | -20 à 60 |
| | Humidité relative (%) | 0 à 90 |
| | Pression atmosphérique (hPa) | 500 à 1060 |

7.4 Arrêt de l'appareil en cours de fonctionnement

✘ **Stopper l'appareil de contrôle et suivre les indications d'un médecin dans les cas suivants :**

- 1) Lorsqu'on éprouve des difficultés pour respirer ou des vertiges.
- 2) Lorsqu'une partie du corps ressent un effet de compression trop fort.
- 3) Lorsqu'on sent une douleur très vive pendant le fonctionnement de l'appareil.
- 4) Lorsque le corps est temporairement paralysé et qu'il ne ressent aucune démangeaison.
- 5) Lorsqu'on ressent n'importe quel phénomène étrange en cours de séance.

7.5 Recommandations

✘ Compte tenu du fait que cet appareil est un appareil médical destiné à aider dans le cadre d'une thérapie, vous devez utiliser AROSHA LX9 facilement en suivant les conseils d'un médecin. Quand un patient ressent de plus en plus faiblement l'effet de compression au cours d'une séance, c'est parce qu'il s'est accoutumé à cet effet de compression. C'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser l'appareil pendant une longue période et qu'il est impératif de suivre les indications d'un médecin.

8. Auto-contrôle pour utiliser l'appareil

| Conditions d'utilisation | Points à vérifier |
|---|---|
| Pas d'alimentation électrique | <ul style="list-style-type: none">- L'appareil est-il correctement branché ?- La tension est-elle correcte ?- Un court-circuit ? |
| Ne fonctionne pas après la mise sous tension | <ul style="list-style-type: none">- Débrancher l'appareil, puis rebrancher le. |
| Bruits en cours de fonctionnement | <ul style="list-style-type: none">- L'appareil est-il placé horizontalement ?- Est-ce qu'il y a un objet ou de la poussière dans le compresseur ? |
| Pas d'air en provenance du tuyau | <ul style="list-style-type: none">- Le tuyau est-il plié ?- Le tuyau est-il correctement enfoncé dans la prise d'air ? |
| Ne passe pas à l'étape suivante après avoir fonctionné pendant 90 secondes pendant que l'air était insufflé dans la chambre | <ul style="list-style-type: none">- La chambre à air est-elle endommagée ?- Est-ce qu'il y a une fuite d'air ?- Si le manchon est endommagé ou s'il y a une fuite d'air, le capteur de compression le détectera et stoppera la chambre pendant 1 minute, puis passera à l'étape suivante. |

Nous apprécions tout particulièrement que vous utilisiez notre appareil. Nous, Daesung Maref, faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de nos appareils. Nous ferons également de notre mieux pour bien accompagner les utilisateurs.










Dans les cas suivants, nous ne pouvons pas réparer notre appareil gratuitement même s'il est encore dans sa période de garantie :

1. Problème causé par un choc violent.
2. Si l'utilisateur a essayé de réparer l'appareil lui-même ou s'il a essayé de reproduire une pièce intérieure de manière arbitraire.
3. En cas d'utilisation de l'appareil en un lieu qui lui est interdit.
4. En cas de non respect de notre mode d'emploi.
5. Les manchons sont des consommables.

PERIODE DE GARANTIE : 1 an pour l'appareil.

2 mois pour les accessoires.

REMARQUE: Manchons sont des produits dégradables.

| | | |
|---|--|--|
|  MANUFACTURER | DAESUNG MAREF CO., LTD. 298-24, Gongdan-ro, Gunpo-shi, Geonggi-do, 435-862, Korea Tel : +82 31 459 7211 Fax : +82 31 459 7215 | |
|  IN THE EC | SUPPLY MEDICAL SERVICE 18, CHEMIN DES COURSES 31100 TOULOUSE, FRANCE Tel : +33 (0)5 3450 4455 Fax : +33 (0)5 3450 4461 | |
| Model: Lympha-sys9 |     | |
| Weight: 2kg (only body) | | |
| Dimension: 260(W) x 160 (D) x 120 (H) mm | | |
| Power consumption: 50VA | | |
| Power source: <input checked="" type="checkbox"/> 230V~, 50/60Hz | | |
| Place: Indoors | | |
| Made in Korea | | |
|  IPX0 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •When the problem happens, stop the operation immediately, then turn a power switch off. •When the machine is unfit for body, please stop using a machine. •The electricity is suddenly off, separate hoses from pad and eliminate the air. •Do not use under the high temperature places as sauna, bathroom or the place where humidity is very high. •Do not connect body with another machine or modify absolutely. •Plug off a power cord from socket when you don't use. •See accompanying documents. •To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. | | |
|  DATE OF MANUFACTURE | | |
|  SERIAL NUMBER | | |

10. protocole d'application

AROSHA LX9



| Problèmes | Durée du traitement | Fonction d'être sélectionné | Pression (mmHg) | Vitesse | Configuration recommandée |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| cellulite fibreuse | 30 ÷ 35 min | B | 30~60mmHg | 3 | Drainage set ou manchon abdomen |
| cellulite oedémateuse | 40 min | B | 30~40mmHg | 3 | Drainage set ou manchon abdomen |
| adiposité | 30 ÷ 35 min | B | 30~50mmHg | 3 | Drainage set ou manchon abdomen |
| Drainage lymphatique complet | 35 ÷ 40 min | B | 30~40mmHg | 3 | Drainage set |
| Drainage lymphatique partiel | 30 min | B | 30~40mmHg | 3 | Basic set |
| Désintoxication | 30 min | B | 40~60mmHg | 3 | Drainage set |
| Amélioration de la circulation | 30 min | C | 40~60mmHg | 3 ÷ 4 | Drainage set |
| Peau élastique | 30 min | C | 40~60mmHg | 3 ÷ 4 | Basic set ou Drainage set |
| Traitement anti-stress | 20 ÷ 25 min | C | 30~50mmHg | 3 ÷ 5 | Basic set ou Drainage set |
| Massage | 30 min | A | 60~80mmHg | 2 | Basic set ou Drainage set |
| Mains et pieds froids | 25 ÷ 30 min | A | 40~60mmHg | 3 ÷ 4 | Basic set ou Drainage set |
| Effect gymnastique | 20 min | A | 40~60mmHg | 3 ÷ 4 | Basic set |
| Arrangement Pelvis | 30 min | D | 40~60mmHg | 3 | Basic set ou Drainage set |

AROSHA

LX9



N° art. 020986

Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83, 3400 Burgdorf - T 034 420 08 00, F 034 420 08 01 info@simonkeller.ch, www.simonkeller.ch
Filiale Deutschschweiz, Im Schörl 3, 8600 Dübendorf - T 044 420 08 00, F 044 420 08 01 duebendorf@simonkeller.ch
Filiale Westschweiz, Rte de la Chocolatière 26, 1026 Echandens - T 021 702 40 00, F 021 702 40 31 vente@simonkeller.ch

Keller
beauty