

CRYSTAPEEL®

Manuel d'utilisation avec explications détaillées



Sommaire

- 1 Accueil
- 2 CRYSTAPEEL® Contenu de la livraison
- 3 Présentation du produit
- 4 Premières étapes
- 5 Microdermabrasion avec CRYSTAPEEL®
- 6 Procédure de traitement
- 7 Nettoyage et entretien
- 8 Maintenance et usure
- 9 Dépannage
- 10 Informations utiles
- 11 Données techniques
- 12 Réparations et service sht
- 13 Envoi de l'appareil

Chères clientes CRYSTAPEEL, chers clients CRYSTAPEEL,

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour l'appareil de microdermabrasion CRYSTAPEEL, un produit de haute technologie d'origine allemande. Afin que vous puissiez intégrer CRYSTAPEEL de la façon la plus efficace et la plus réussie à votre offre de traitement, nous vous prions de prendre connaissance en conséquence du manuel d'utilisation.

Important : vous devez pouvoir profiter du produit CRYSTAPEEL - sans avoir à effectuer une lecture intensive ! Donc si quelque chose ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à nous appeler au : +41 34 420 08 00

Nous vous aiderons VOLONTIERS !

Votre équipe Simon Keller AG



2 CRYSTAPEEL® Contenu de la livraison

1x APPAREIL DE MICRODERMABRASION CRYSTAPEEL® 230V

1x cordon d'alimentation électrique

1x pièce à main avec système Easy-Click, buse et embout de traitement

1x adaptateur FC à microcristaux

2x CRYSTAPEEL® Intensive Abrasion Crystals 500g

1x kit de pièces de rechange et d'articles d'usure

comportant

1x filtre UC

1x entonnoir d'insertion des cristaux FC

2x bague d'étanchéité pour flacon

2x bague d'étanchéité pour pièce à main

2x bague d'étanchéité pour grand adaptateur Easy-Click

2x bague d'étanchéité pour petit adaptateur ou buse Easy-Click

4x embout de traitement métallique

1x embout de protection de la pièce à main (embout de verrouillage du système sous vide)

1x support de nettoyage filtre UC


3 Présentation du produit

Face avant



- 1 Manomètre
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Bouton de réglage
- 4 Adaptateur Easy-Click

Face arrière

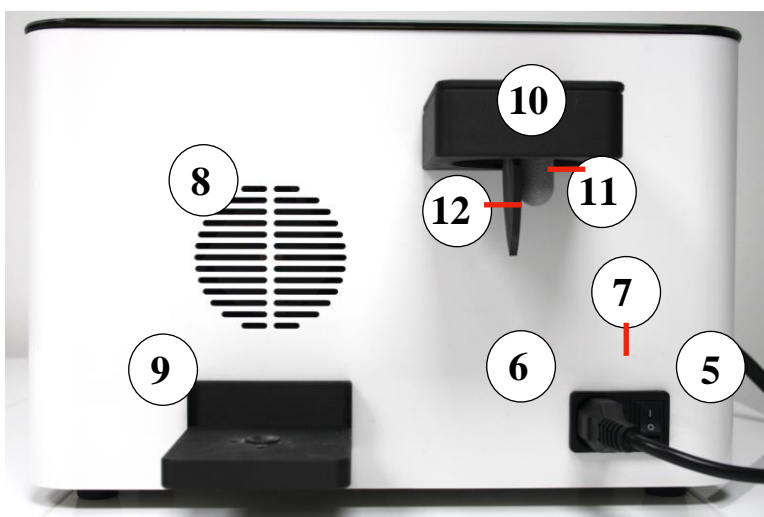

- 5 Interrupteur principal
- 6 Prise pour cordon de raccordement électrique
- 7 Logement fusibles avec fusible de rechange
- 8 Fentes d'aération
- 9 Connecteur FC
- 10 Connecteur UC
- 11 Filtre UC
- 12 Protection de filtre UC

Pièce à main



- 13 Pièce à main
- 14 Buse avec bague d'étanchéité rouge
- 15 Embout de traitement



Adaptateur FC avec filtre or FC

3 Premières étapes

3.1 Vérification de l'absence de dommages

Veillez vérifier tout d'abord si l'emballage présente un dommage apparent. Si tel est le cas, cela doit être communiqué en général immédiatement au moment de la livraison au prestataire de services de transport qui en est responsable.

Si toutefois vous ne l'avez découvert qu'après la livraison ? Alors photographiez les dommages et contactez-nous directement au : +41 34 420 08 00. Nous coordonnons alors avec vous les étapes suivantes.

Vérifiez ensuite si l'appareil ou les divers composants présentent d'éventuels dommages, en tenant compte notamment de contacts électriques exposés et non protégés et/ou de composants cassés avec des angles et des bords à arêtes vives, présentant un risque de blessure. N'hésitez pas à nous contacter directement au : +41 34 420 08 00. Nous coordonnons alors avec vous les étapes suivantes.

Dans ces cas, vous ne pouvez pas mettre CRYSTAPEEL® en service, pour votre propre sécurité.

3.2 Mise en place

Veillez placer de préférence CRYSTAPEEL sur un chariot à instruments, qui est prévu pour le poids de l'appareil ainsi que celui des produits utilisés au cours du traitement et qui est équipé d'au moins deux roulettes verrouillables.

Des orifices d'aération, indispensables à la circulation de l'air, sont situés sur la partie inférieure de l'appareil. Assurez-vous de ne pas boucher les orifices d'aération par une serviette ou par d'autres objets au niveau de la partie inférieure de l'appareil. Sinon il peut se produire une surchauffe dans l'appareil et, en conséquence, une coupure de sécurité temporaire.

3.3 Raccordement

Veillez prendre le cordon d'alimentation électrique et l'insérer d'abord dans la prise de branchement électrique sur la partie arrière de CRYSTAPEEL, puis ensuite dans une prise appropriée. L'adaptateur UC (Used Crystal Adapter) , dans lequel sont recueillis les microcristaux usagés, se situe au dos de l'appareil.

Veillez fixer le filtre gris UC et la protection de filtre UC sur celui-ci. Vissez ensuite un flacon CRYSTAPEEL vide (une rotation d'un quart de tour assure déjà une fixation étanche et solide).

Avant que vous ne mettiez la pièce à main en place, vérifiez si une bague d'étanchéité est montée sur chacun des deux tubes connecteurs, au niveau de l'adaptateur Easy-Klick de CRYSTAPEEL sur l'appareil. Celle-ci est importante pour assurer l'étanchéité du système et éviter des pertes sous vide.

Prenez ensuite la pièce à main et raccordez-la à l'appareil à l'aide de l'adaptateur Easy-Click. Veillez à la protection anti-torsion : l'adaptateur Easy-Click est monté de telle sorte que le petit tube connecteur soit inséré dans le petit orifice et que le tube connecteur plus grand soit inséré dans l'orifice adaptateur plus grand.

Remarque : l'adaptateur Easy-Click doit être solidement fixé sur l'appareil. Lors des premières utilisations, une pression accrue est tout à fait normale pour la mise en place, jusqu'à ce que l'adaptateur affleure au boîtier.



Insérez la buse CRYSTAPEEL fournie sur le côté avec la bague d'étanchéité rouge dans l'orifice central sur la pièce à main.

Placez ensuite l'embout de traitement sur la pièce à main. L'embout de traitement est fixé sur la pièce à main par une bague d'étanchéité. Comme son nom l'indique déjà, la bague d'étanchéité protège également contre la perte de vide. Veuillez la remplacer si l'embout de traitement est desserré ou si la bague d'étanchéité est usée. Vous trouverez des bagues d'étanchéité supplémentaires dans le kit de pièces de rechange et d'articles d'usure.

Vous pouvez à présent placer la pièce à main CRYSTAPEEL sur le marquage de la plaque en verre supérieure. La pièce à main est maintenue dans cette position par des aimants intégrés.

3.4 Avant la mise en service

Avant de démarrer tout traitement, assurez-vous que le filtre gris UC gris et la protection de filtre soient insérés sur l'adaptateur UC et que le flacon vide soit correctement vissé.

Prenez alors un flacon de microcristaux CRYSTAPEEL (0,5 kg), retirez le sachet déshydratant et vissez le flacon sur l'adaptateur FC (Fresh Crystal Adapter / adaptateur nouveaux microcristaux).



3.5 Support de pièce à main

Vous pouvez déposer la pièce à main à n'importe quel endroit. Sur l'appareil CRYSTAPEEL® même, la pièce à main est fixée sur la plaque en verre au moyen des aimants intégrés, sur le côté droit sur le marquage du sigle CRYSTAPEEL. De cette façon, la pièce à main est facile d'accès pour vous à tout moment. Veillez toutefois à ne pas heurter la plaque avec l'embout de traitement, sinon la plaque en verre peut se rayer.



4 Microdermabrasion avec CRYSTAPEEL®

Mettez CRYSTAPEEL® sous tension avec l'interrupteur marche/arrêt, sur la face arrière de l'appareil (position I de l'interrupteur).


Vérifiez si l'adaptateur contient suffisamment de microcristaux sur le côté des nouveaux microcristaux dans l'adaptateur FC. Placez évt. un 2e flacon de microcristaux à portée de main.







Retirez alors l'embout de protection de la pièce à main et placez un embout de traitement stérilisé sur la pièce à main.

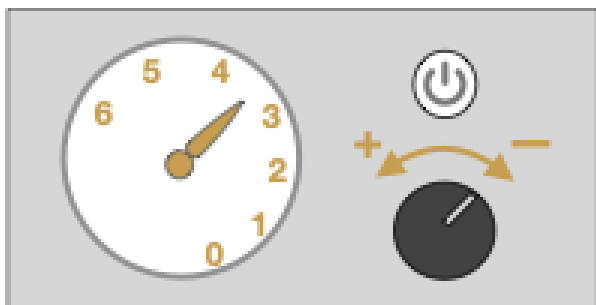Puis allumez CRYSTAPEEL sur la partie frontale de l'appareil.

Sélection de l'intensité d'abrasion

En ce qui concerne le réglage du vide optimal pour le traitement, consultez le tableau ci-après. (Le manomètre sert au diagnostic du système.)



Régulateur	Zones de peau	Exemples
	Zones sensibles	yeux, cou, décolleté
	Zones du visage des clients/es sensibles	
	Sensible-normal	autres zones du visage Non sensible
	Forte kératinisation Zones de visage résistantes Zones sensibles du corps	
	Zones normales du corps	
	Toutes les zones du corps, traitement des cicatrices	

Déjà au démarrage, c.-à.-d. en-dessous de la valeur 0,05 bar, CRYSTAPEEL offre une puissance suffisante pour le traitement des zones sensibles.

Traitement au CRYSTAPEEL

Vérifiez d'abord si vous avez préparé tous les produits et adjuvants requis pour vous et pour le traitement.

Principes fondamentaux du processus de traitement :

Tendez la portion de peau sur laquelle vous voulez appliquer la pièce à main à l'aide de l'index et du majeur de votre main libre. Vous travaillez alors à partir des doigts positionnés, et non vers les doigts.

Travaillez selon un motif en damier :

Tout d'abord à partir du centre du visage vers l'extérieur, puis perpendiculairement au sens initial vers le haut (dans la zone supérieure du visage) resp. vers le bas.

Réglage de la douceur du traitement (via la quantité de microcristaux)

Vous avez la possibilité de régler la consommation en microcristaux sur 3 niveaux. L'adaptateur FC est doté de différents marquages sur les surfaces latérales :

- un point quantité consommée la plus faible (environ 7,5 g/minute)
= réglage pour une consommation particulièrement faible
- ● deux points quantité moyenne consommée
- ● ● trois points quantité consommée la plus élevée (environ 22,5 g/minute)
= sensation de peau particulièrement douce

La quantité consommée réglée est celle qui est dirigée vers l'arrière (donc dans la direction opposée à l'appareil) !

Placez par conséquent l'adaptateur FC sur le connecteur situé sur la face arrière de l'appareil de telle sorte que le réglage souhaité de l'appareil soit dirigé vers l'arrière.

Le 4e niveau de réglage montre un **X** - cette position verrouille l'appareil via l'adaptateur pendant les périodes auxquelles vous ne l'utilisez pas - principalement la nuit et le week-end et empêche de cette façon la pénétration d'humidité via l'adaptateur dans le flacon de microcristaux et le système. Pour empêcher une pénétration de l'humidité à partir de la pièce à main, veuillez monter l'embout de protection à l'arrêt du traitement.

Le réglage **X** et l'embout de protection protègent largement l'appareil contre la pénétration d'humidité.

6 Procédure de traitement

Étapes	Phase	Objectif (destiné à ?)	Application du produit (quels sont les produits appropriés ?)
<i>Préparation</i>			
	Nettoyage		Lait de nettoyage évtl. de l'eau tonique
	Phase pré peeling	dissoudre	Peeling doux aux acides de fruits
	Sécher		
<i>Traitement</i>			
	Processus de microdermabrasion		
	Nettoyage à sec		Brosse
	Nettoyage humide		Éponge
<i>Après la microdermabrasion</i>			
	Traitement agent actif	Intensification des objectifs cosmétiques	En fonction des besoins de la peau et de l'indication

Veillez observer :

que la microdermabrasion agit comme un booster et augmente la pénétration d'agents actifs dans la peau. C'est pourquoi il vous faut doser les agents actifs de façon judicieuse et pas trop élevée !

Soins de finition

Protection solaire de la peau traitée !

Plan de soins à domicile :

Mettez en place un plan de soins individuel pour la période allant jusqu'au traitement suivant sur la base de la peau et des produits cosmétiques que vous avez sélectionnés. Observez les aspects suivants :

- Hydratation suffisante
- Renforcez l'effet et évitez les réactions inappropriées : si le client utilise des produits inappropriés à domicile, alors le résultat des soins ne peut pas être obtenu et, en fonction de leur compatibilité, des réactions indésirables de la peau peuvent se présenter suite à une action renforcée. Il est donc important que le client suive vos recommandations de soins individuelles pendant les 14 jours suivants.
- Amélioration durable de la peau grâce à l'utilisation des produits de soins individuels à domicile.
- Protection solaire efficace (en fonction de la durée de l'exposition au soleil)

Veillez observer : dans les 3-5 jours suivant le traitement (en fonction de son intensité), ne pas exposer la peau au rayonnement solaire direct et éviter les activités sudorifiques, y compris le sauna.

Après le traitement

Retirez l'embout de traitement de la pièce à main (désinfection impérative). Placez ensuite l'embout de protection de la pièce à main (embout de verrouillage du système sous vide) sur la pièce à main. Il n'est pas nécessaire de dévisser la buse de la pièce à main, puisque l'embout protège la buse des dommages, tout en empêchant largement la pénétration d'humidité dans le système.

Tournez l'adaptateur FC sur la position **X**, afin qu'aucun air ne pénètre latéralement dans le système.

7 Nettoyage et entretien

Appareil et plaque en verre

Avant de nettoyer la plaque en verre, éliminez les microcristaux existants à l'aide d'un pinceau. Sinon la plaque pourrait se rayer avec le temps.

Veuillez ne nettoyer aucun composant sous l'eau courante, à l'exception du filtre UC. Attention : si de l'eau pénètre dans l'appareil, cela peut provoquer un court-circuit. L'eau pénétrant dans le système de vide conduit inévitablement au bouchage.

Pièce à main

Retirez l'embout de traitement de la pièce à main (stérilisation/désinfection indispensable). Placez ensuite l'embout de protection de la pièce à main (embout de verrouillage du système sous vide) sur la pièce à main. Il n'est pas nécessaire de dévisser la buse de la pièce à main, puisque l'embout protège la buse des dommages, tout en empêchant largement la pénétration d'humidité dans le système.

8 Maintenance et usure

Avec la microdermabrasion, la peau est traitée avec des microcristaux qui sont abrasifs, c.-à.-d. qui érodent la surface de la peau.

La surface de divers composants de l'appareil est également soumise à cet effet abrasif. Ces pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie légale, ni par la garantie du fabricant.

Remplacement et/ou insertion de la buse dans la pièce à main

Retirez l'embout de protection de la pièce à main, dévissez la buse usée dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre de la pièce à main, insérez ensuite la nouvelle buse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'ouverture centrale de la pièce à main. Assurez-vous que la partie la plus large de la buse soit bien insérée et que la pointe de la buse forme également la pointe supérieure de la pièce à main. La buse est enfoncée à moitié. Il est prévu que la buse soit bien en appui pour éviter d'éventuelles pertes de pression.

Insérez ensuite l'embout de protection à nouveau sur la pièce à main.

Remplacement de l'entonnoir à microcristaux FC dans l'adaptateur FC

Pendant le fonctionnement, les microcristaux dans l'adaptateur FC agrandissent continuellement l'orifice que vous pouvez voir dans le fond de l'adaptateur FC. Si l'orifice s'agrandit, la consommation en microcristaux augmente de manière disproportionnée. Afin que la consommation en microcristaux dans la zone indiquée (+/- 10%) d'environ 7,5g/minute (réglage de consommation à 1 point) reste dans la zone prévue, remplacez l'entonnoir à microcristaux FC au bout de 10-20 flacons de microcristaux utilisés : pour ce faire, poussez l'entonnoir à microcristaux FC depuis la partie inférieure de l'adaptateur FC vers le haut. Mettez le nouvel entonnoir à microcristaux en place dans l'adaptateur en procédant dans le sens inverse. Il est tout-à-fait prévu que les deux composants soient placés l'un contre l'autre ; par conséquent, la pièce ne peut être mise en place qu'en exerçant une certaine pression et en forçant légèrement. Si des microcristaux devaient se trouver dans les interstices, retirez-les d'abord.

Remplacement du flacon de microcristaux et nettoyage du filtre UC

Une fois que vous avez consommé le contenu d'un flacon complet de microcristaux, le flacon sur l'adaptateur UC s'est rempli des microcristaux consommés.

Portez un masque de protection. Dévissez le flacon complètement rempli et éliminez-le (généralement dans les déchets ménagers, si possible le flacon en verre au recyclage). Veillez à ne pas éparpiller les microcristaux pour des raisons d'hygiène.

Retirez ensuite le filtre UC, placez-le dans le support de nettoyage (voir l'illustration / le cas échéant dans un flacon vide pour microcristaux) et lavez-le sous l'eau courante pendant environ 1 minute. De cette manière les particules fines du filtre sont dissoutes. Un nettoyage régulier du filtre augmente sa durée de vie.

Mettez le filtre à sécher (environ >6 heures) (évtl. aussi dans le flacon vide pour microcristaux). Montez le 2e filtre (situé dans les accessoires de l'appareil) dans l'adaptateur UC.

(Dans la mesure où vous ne disposez pas d'un 2e filtre, procédez comme suit : secouez brièvement le filtre humide à la main. Placez à nouveau le filtre dans l'adaptateur UC de l'appareil, vissez un flacon vide et propre sous l'adaptateur UC. Retirez l'adaptateur FC de l'appareil, allumez l'appareil et tournez le régulateur sur la position la plus élevée. Fermez alors la pièce à main et le trou central dans l'adaptateur FC pendant environ 20 secondes. L'humidité est extraite du filtre par le vide. Ensuite, vous pouvez continuer à travailler comme d'habitude.)




Remplacement des fusibles

Arrêtez tout d'abord l'appareil (1),
débranchez ensuite la fiche secteur (2).
Retirez ensuite le logement des fusibles (3).



Retirez à présent le fusible défectueux (4) et éliminez-le.
L'autre fusible (5) est un fusible de remplacement, que vous
pouvez alors insérer.

Puis insérez le logement des fusibles dans l'appareil.

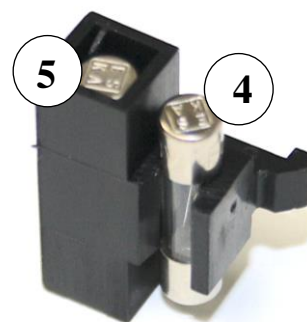

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au :
+41 34 420 08 00.

9 Dépannage

CRYSTAPEEL s'arrête complètement au cours du traitement.

Cause	Dépannage
Cordon d'alimentation électrique endommagé	Si vous constatez des dommages sur les composants conducteurs, vous ne devez plus utiliser l'appareil, pour votre propre sécurité. Contactez-nous immédiatement au : +41 34 420 08 00.
Faux contact à la prise électrique	Vérifiez la fixation correcte du cordon d'alimentation électrique sur la face arrière de l'appareil et au niveau de la fiche secteur
Le fusible a grillé.	Une surtension externe a été interceptée par les fusibles. Veuillez remplacer les fusibles comme décrit sous le point de menu <i>Remplacement des fusibles</i> .
Surchauffe	Lorsque au-dessous ou à l'arrière de l'appareil les orifices sont recouverts, l'air d'échappement surchauffé ne peut pas être évacué de l'appareil et CRYSTAPEEL est en surchauffe, l'appareil va alors s'arrêter pour des raisons de sécurité. Veuillez retirer les objets qui obturent les orifices de l'appareil. Au bout d'environ 30-60 minutes, vous pouvez rallumer l'appareil. La surchauffe ne provoque aucun dommage à l'appareil.

Pas de microcristaux

Pas ou peu de vide sur la pièce à main

L'embout de traitement n'est pas affleurant sur la pièce à main

Si l'embout de traitement est desserré ou si la bague d'étanchéité est usée ou endommagée, remplacez celle-ci. Vous trouvez des bagues d'étanchéité supplémentaires dans le kit de pièces de rechange et d'articles d'usure.

Flacon CRYSTAPEEL vide non vissé ou pas correctement vissé sur le connecteur de microcristaux résiduels.

Il se peut que le flacon ait été mis en place en position inclinée. Veuillez vérifier et revisser.

Le joint dans le connecteur de microcristaux résiduels / l'adaptateur FC / l'adaptateur de la pièce à main Easy-Click est absent.

Les joints manquants sont un problème fondamental, puisque le vide ne s'établit alors pas complètement. Si vous constatez qu'un joint est absent ou endommagé, remplacez-le.

Vous trouvez des joints de remplacement dans les accessoires.

Le flacon de microcristaux résiduels est trop plein. Videz le flacon ou éliminez-le, y compris les microcristaux. Veillez dans tous les cas à éviter une formation de poussières. Sachez que les microcristaux présents peuvent comporter des germes, etc. à la suite du traitement.

Peu de vide

Retirez le flexible de l'appareil avec l'adaptateur Easy-Click et vérifiez si une bague d'étanchéité rouge est placée sur les deux petits tubes de raccordement. Celle-ci sert à étanchéifier le système et évite les pertes de vide. Vous trouvez des bagues de remplacement dans le kit des pièces de rechange et d'articles d'usure.

Peu de vide / le manomètre montre toutefois un vide élevé

Lorsque vous travaillez avec un vide élevé/une intensité élevée, cela entraîne une accumulation accrue de particules dans le filtre UC (filtre des microcristaux consommés). Au cours du traitement, vous pouvez nettoyer rapidement le filtre comme suit :

Verrouillez la pièce à main, tournez le régulateur sur le vide maximal, ouvrez la pièce à main. Maintenez la pièce à main une nouvelle fois verrouillée pendant environ 2 secondes et ouvrez-la ensuite à nouveau. Cela permet de nettoyer suffisamment le filtre pour le traitement en cours.

Ensuite, vous pouvez laver au besoin le filtre : voir le point 6.

L'adaptateur FC ne peut pas être monté

Des microcristaux se trouvent sur la surface du support pour l'adaptateur FC

Si vous travaillez pour la première fois avec CRYSTAPEEL, il se peut qu'on ne trouve pas directement la position de montage correcte pour l'adaptateur FC.

Dans ce cas : éliminer les microcristaux résiduels se trouvant sur l'adaptateur à l'aide d'une brosse. Veuillez ne pas éliminer les microcristaux se trouvant dans l'entonnoir central. Il est prévu que des microcristaux s'accumulent ici.

10 Informations utiles

Humidité et microcristaux

Le système ne nécessite-t-il pas de filtre anti-humidité permettant de réduire l'humidité de l'air, afin que les microcristaux ne bouchent pas l'appareil ?

De nombreux systèmes travaillent avec un filtre anti-humidité. Les produits déshydratants contenus généralement filtrent certes en continu l'humidité contenue dans l'air (ils peuvent absorber environ 20-25 % du poids propre d'humidité supplémentaire, ensuite ceux-ci sont saturés), mais ce processus de la saturation ne se fait pas en une fraction de seconde, mais sur plusieurs jours et dépend de la température et de l'hygrométrie. L'air circule à des vitesses élevées dans les appareils de microdermabrasion. Des filtres anti-humidité courants tels que, par ex. les cartouches aux billes de gel silicate restent quasiment sans effet, compte-tenu du flux de volume d'air circulant. Seuls des appareils de déshydratation sont efficaces dans ce cas. Ceux-ci ne sont toutefois utilisés dans aucun appareil courant. Épargnez-vous ces dépenses - nous renonçons consciemment aux éléments qui n'ont pas de vraie utilité.

Vider pendant la nuit

Question : est-il important de stocker les microcristaux dans d'autres endroits durant la nuit et de les protéger ainsi contre l'humidité ?

Non, dans ce cas cela n'est pas nécessaire, puisque vous pouvez verrouiller le système quasiment à 100 % contre la pénétration d'humidité et que de cette façon aucune humidité ne peut pénétrer au cours de la nuit. Pour ce faire, tournez l'adaptateur de microcristaux sur la position **X** et placez l'embout de protection sur la pièce à main. Il n'est pas nécessaire de transvaser les microcristaux comme pour de nombreux autres systèmes.



11 Données techniques

Fabricant / Manufacture sht Skin Health Technologies GmbH
Biberger Str. 91
82008 Unterhaching - ALLEMAGNE
info@skinhealthtec.com
Tél. +49 89 54029668

Puissance/Power 200W max.
Tension/voltage 230V/50Hz



La plaque signalétique avec le numéro de série se trouve en-dessous de l'appareil.

12 Réparations et service sht

Veillez nous contacter à temps en cas de réparation ou d'un délai de maintenance nécessaire pour des raisons organisationnelles ou légales. Nous essaierons de vous proposer un appareil de location, pour autant que vous le souhaitez.

Les intervalles de maintenance sont à respecter conformément aux prescriptions en vigueur.

En règle générale, vous pouvez remédier vous-même aux problèmes techniques, avec notre assistance. Dans tous les cas, nous recommandons de nous contacter préalablement avant de renvoyer l'appareil.

13 Envoi de l'appareil

Assurez-vous impérativement que l'appareil soit sécurisé pour le transport dans le carton d'emballage d'origine non endommagé. Si celui-ci devait présenter des dommages, veuillez commander un nouvel emballage auprès de nos services.

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à nous contacter au :

T +41 34 420 08 00

info@simonkeller.ch

Nous vous aiderons volontiers !