

KELLER GALVANETICS® by Ionto

Mode d'action

Grâce à leur excellente conductibilité, les pièces à main KELLER GALVANETICS® font pénétrer les principes actifs dans les tissus tout en massant la peau. Grâce à leur zone de traitement biocompatible (testée médicalement), elles s'adaptent même aux peaux les plus sensibles. Pour faire pénétrer profondément le produit, les deux pièces à main sont utilisées avec une ampoule ou un sérum.

Avantages

- Effet pénétrant ultra-efficace
- Excellente tolérance cutanée (matériaux biocompatibles)
- Electrodes pouvant être désinfectées, stérilisées et réutilisées

Réussites thérapeutiques

- Pour une peau fraîche et lisse
- Pour une cure de rajeunissement de la peau
- Pour hydrater les peaux abîmées par le soleil
- Pour revitaliser les peaux de fumeurs ou les peaux en manque de nutriments
- Pour lutter contre le relâchement et l'atrophie de la peau
- Pour régénérer et clarifier les peaux irritées

Intégration dans le traitement

- Faites pénétrer l'ampoule ou le sérum après humidification de la peau, avant le masque.
- Utilisez les propriétés revitalisantes et hydratantes de cette méthode pour:
 - Hydrater en profondeur immédiatement après un traitement de micro-needling
 - Réhydrater après un soin par radiofréquence
 - Faire pénétrer les substances actives en profondeur après une microdermabrasion ou une stimulation musculaire.

Contre-indications

Avec la méthode KELLER GALVANETICS®, ces contre-indications ne s'appliquent qu'au client. En tant que praticien-ne, vous n'êtes pas concerné-e, sauf si vous touchez les électrodes noires conductibles pendant le soin.

- Maladies cardiaques
- Pacemaker
- Grossesse
- Pompe à insuline implantée
- Inflammations, plaies ouvertes
- Cancers et tumeurs
- Tétanie (crispation des muscles)
- Faiblesses du système circulatoire
- Maladies fiévreuses
- Thromboses, varices, phlébites
- Embolies
- Maladies du système nerveux telles que Parkinson et épilepsie
- Ne pas placer d'électrode au niveau du sinus carotidien (zone où l'artère du cou rejoint la tête)
- Ne pas effectuer de stimulation transthoracique (par la cage thoracique)
- Ne pas effectuer de stimulation transtemporale (d'une tempe à l'autre)


- Ne pas travailler au niveau des orifices du corps
- Ne pas stimuler les globes oculaires
- Implants métalliques
- Affections cutanées telles que la rosacée, la dermatite atopique et le psoriasis, car un traitement stimulant peut déclencher des poussées.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin!

Utilisation

1. Allumer le module KELLER GALVANO®:

- ☞ Appuyez sur la touche de fonction à côté de la touche GALVANO dans le menu principal. Le sous-menu GALVANO s'affiche.

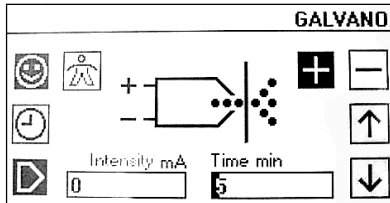

- ☞ Branchez un câble GALVANO à prise blanche et un à prise noire aux pièces à main KELLER GALVANETICS®. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble à l'appareil.
- ☞ Appliquez une couche généreuse de gel de contact (ou ampoule/sérum) de votre ligne cosmétique sur la peau du visage nettoyée.
- ☞ Bloquez les câbles sous votre aisselle afin qu'ils ne vous dérangent pas pendant le traitement. Veillez à ne pas débrancher les pièces à main pendant le traitement, car la reprise du courant peut entraîner de mini-décharges qui susceptibles d'être ressenties comme désagréables par le client. L'appareil peut être utilisé 10 à 20 minutes au total en soin du visage.

2. Régler les paramètres d'utilisation:



Remarque

L'électrode de traitement a toujours la même polarité que le produit.

Ampoule (+) = électrode de traitement de pôle (+); électrode négative de pôle (-)

Ampoule (-) = électrode de traitement de pôle (-); électrode négative de pôle (+)

Réglez la polarité avec la touche de fonction supérieure droite:



positif



négatif

À l'aide de la touche de fonction supérieure gauche, sélectionnez la zone de traitement:



Visage : intensité de 0 à 2 mA






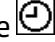



Corps : intensité de 0 à 10 mA

Remarque


Avant de commencer le traitement, réglez l'intensité sur zéro.



- ☞ Augmentez lentement l'intensité jusqu'à ce que le client ressente un léger picotement.
- ☞ Diminuez ensuite l'intensité palier par palier jusqu'à ce que le picotement disparaisse à nouveau (niveau inférieur).

- ☞ Appuyez sur la touche de fonction inférieure gauche  pour régler l'intensité.
- ☞ Appuyez sur la touche de fonction droite  pour diminuer l'intensité.
- ☞ Appuyez sur la touche de fonction droite  pour augmenter l'intensité.
- ☞ L'intensité «INTENSITY» qui s'affiche à l'écran indique le courant qui circule en milliampères (mA).
- ☞ Appuyez sur la touche de fonction gauche  pour régler la durée de traitement.
- ☞ Appuyez sur la touche de fonction droite  pour augmenter la durée.
- ☞ Appuyez sur la touche de fonction droite  pour diminuer la durée.
- ☞ La durée de traitement réglée en minutes «Time min» s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
- ☞ Appuyez sur la touche START.
- ☞ Un bip sonore retentit lorsque la durée de traitement sélectionnée est écoulée.
- ☞ Appuyez sur la touche STOP pour interrompre le traitement en cours.
- ☞ Quatre bips sonores retentissent.
- ☞ Appuyez à nouveau sur la touche Pause  ou START pour redémarrer l'utilisation.

Éteindre le module KELLER GALVANO:

- ☞ Appuyez sur la touche Pause  ou STOP pour interrompre l'utilisation.
- ☞ Pour revenir au menu principal, appuyez encore une fois sur la touche STOP.

Attention



- ☞ Les électrodes doivent être placées et raccordées avant le début du traitement.
- ☞ Placez des bandes Vlies entre les électrodes et la peau. Les bandes Vlies et les électrodes doivent être bien imprégnées d'eau.
- ☞ Veillez toujours à ce que les électrodes soient placées sur une grande surface de la peau et aient un bon contact.
- ☞ Un mauvais contact pourrait causer des douleurs lancinantes et même des brûlures cutanées.
- ☞ Ne jamais placer ou enlever des électrodes de la peau lorsque celles-ci sont allumées.
- ☞ Les électrodes peuvent uniquement être utilisées sur une peau sans blessures et doivent seulement rester sur la peau pour la durée du traitement.



Remarque

- ☞ La polarité et la zone de traitement ne peuvent être modifiées pendant le traitement.
- ☞ L'intensité du courant peut changer pendant le traitement car la peau, en tant qu'organe vivant avec un système de circulation sanguine et une teneur variable en eau et en graisse, ne possède pas une conductibilité électrique constante.
- ☞ Les zones du corps choisies et le mouvement des électrodes exercent aussi une influence sur le courant qui circule.


Nettoyage et entretien



Attention!

Danger de décharge électrique!
Débrancher l'appareil avant chaque nettoyage.

- ☞ Désinfectez les pièces à main blanches KELLER GALVANETICS® avec un désinfectant doux. Nous recommandons pour cela les lingettes de nettoyage et de désinfection Ecolab Sani-Cloth® Active (n° art. 021845, boîte de 90 pièces).

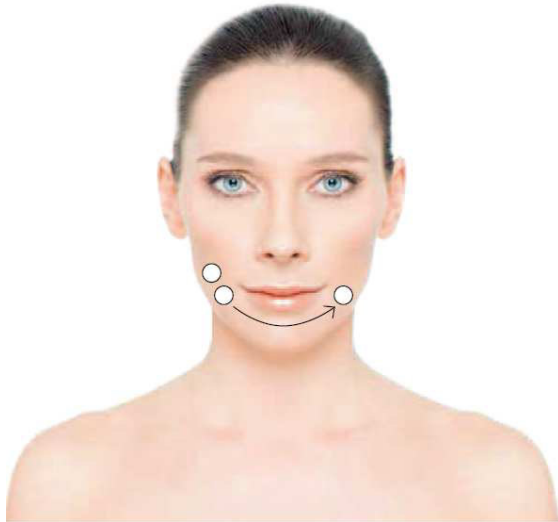

1. Placez les deux électrodes l'une à côté de l'autre en bas de la joue (droite ou gauche). Avec votre main libre, réglez l'intensité sur l'appareil. Celle-ci doit se situer entre le seuil d'insensibilité (pas de sensation électrique perceptible) et le seuil de sensibilité (sensation électrique juste perceptible). Laissez-vous toujours guider par les sensations de votre client. Effleurez l'autre moitié du visage avec l'électrode inférieure.



2. Massez sans appuyer par des mouvements circulaires, du milieu du menton à l'oreille, en suivant la ligne du menton. Effectuez les mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Revenez au milieu du menton tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau.

Répétez 3 fois




3. Massez sans appuyer depuis le bord de la lèvre inférieure jusqu'à l'oreille en passant par le bas de la joue. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau. A la fin de la dernière répétition, revenez au-dessus de la lèvre supérieure.

Répétez 3 fois



4. Massez la joue en appuyant légèrement depuis le haut de la lèvre supérieure jusqu'à l'oreille. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau.

Répétez 3 fois

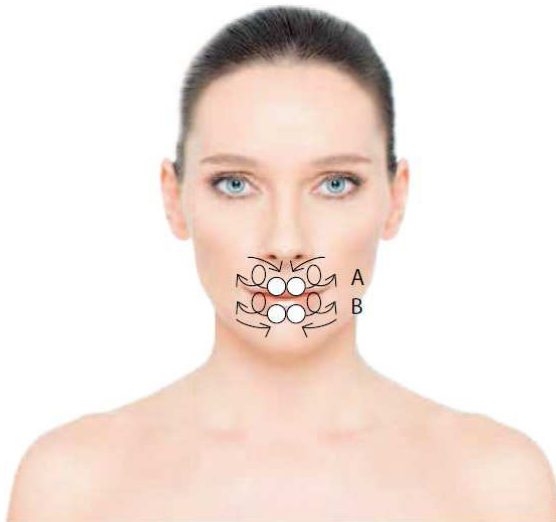

5. A) Massez sans appuyer la zone de la lèvre supérieure par des mouvements circulaires, en travaillant du milieu vers l'extérieur. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau. Effectuez des cercles de l'intérieur vers l'extérieur.


B) Traitez la lèvre inférieure comme décrit en A).

Répétez 4 fois



6. Amenez les électrodes au niveau des yeux et massez sous les yeux en appuyant légèrement jusqu'à la base des cheveux. Ne continuez pas jusqu'aux tempes. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau. A la fin de la dernière répétition, revenez à la racine des sourcils.

Répétez 3 fois

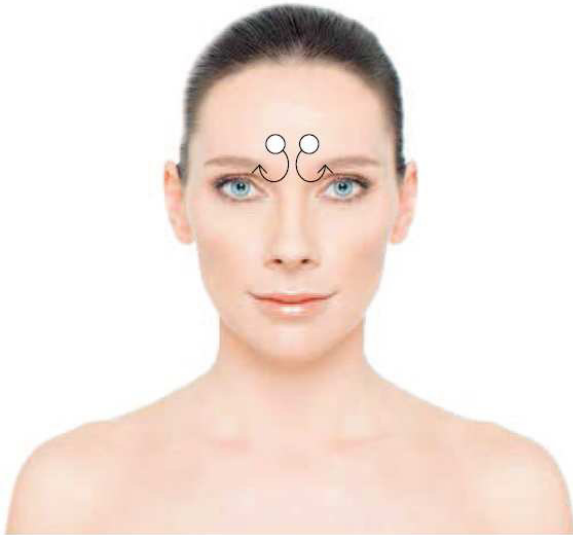

7. Effectuez des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur, sans appuyer, depuis la racine des sourcils jusqu'au front. Soulevez légèrement la peau lors du mouvement ascendant.

Répétez 3 fois



8. Effectuez des mouvements circulaires sans appuyer, de l'intérieur vers l'extérieur, au-dessus des sourcils. Ne continuez pas jusqu'aux tempes. Revenez au point de départ sans relever les électrodes.

Répétez 3 fois



9. Massez sans appuyer en effectuant des mouvements circulaires du milieu du front à la base des cheveux. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau.

Répétez 3 fois



10. Massez sans appuyer en effectuant des mouvements circulaires le long de la base des cheveux, de l'intérieur vers l'extérieur. Revenez au point de départ tout en maintenant le contact des électrodes avec la peau.

Répétez 3 fois



11. Dirigez les deux électrodes sur la tempe droite ou gauche. Demandez au client de tourner la tête sur le côté.



12. Passez les deux électrodes le long de la tempe de haut en bas et de bas en haut jusqu'à la base des cheveux au-dessus des tempes.


Répétez 4-5 fois



13. Pour cibler encore mieux les ridules à côté de l'œil, déplacez l'électrode inférieure sur la joue. Effectuez des mouvements circulaires pendant 15 secondes maximum avec l'électrode supérieure directement sur l'endroit concerné.




14. Déplacez les deux électrodes ensemble sur la tempe droite (gauche). Demandez au client de tourner la tête sur le côté. Exécutez les étapes 12 et 13. Permutez les deux électrodes (prenez l'électrode gauche dans la main droite et vice-versa). Répétez toutes les étapes 1 à 14. Il est essentiel de permuter les électrodes et de répéter les étapes pour libérer tous les principes actifs (+ ou -) de manière homogène sur les deux moitiés du visage.

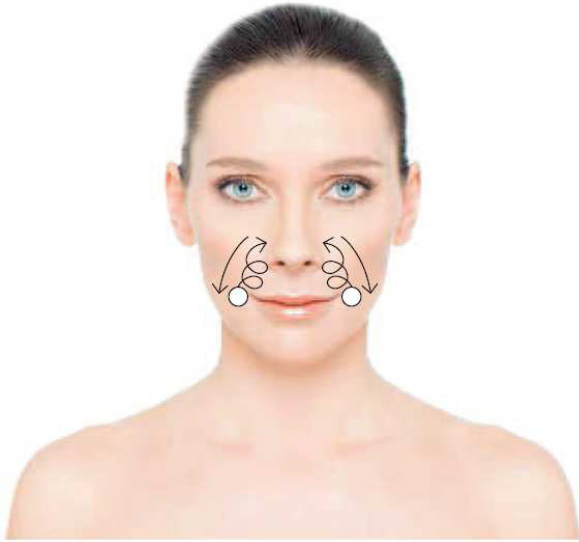


TRAITEMENT DU SILLON NASOGÉNIEN

Répétez 3 fois

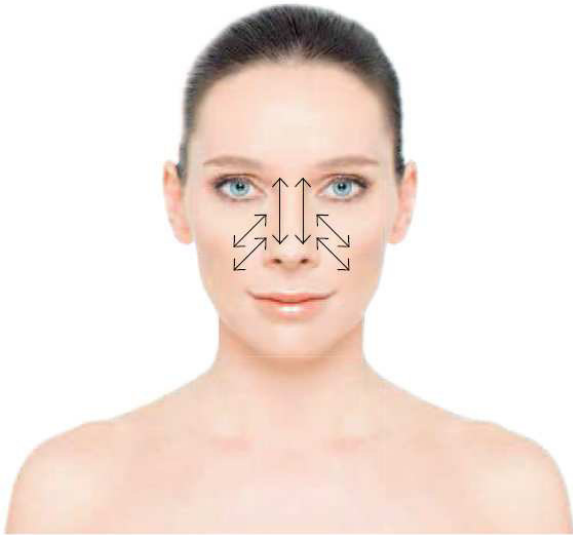

TRAITEMENT DU NEZ

Répétez 3 fois

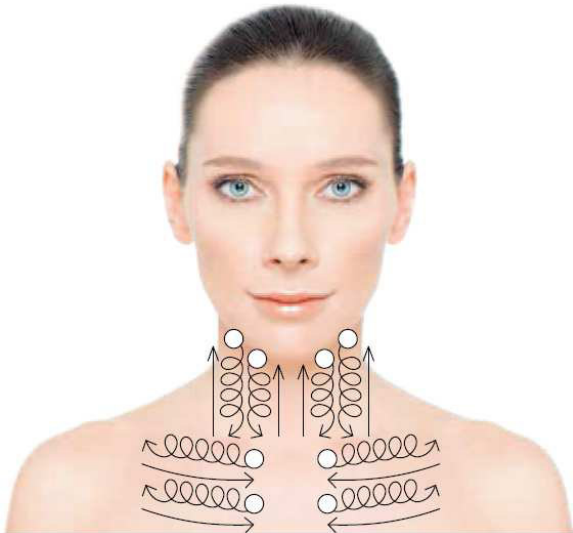

TRAITEMENT DU COU ET DU DÉCOLLETÉ


Ne passez pas sur la thyroïde.

Répétez 3 fois


MOUVEMENTS INTERDITS



Ne placez pas les électrodes sur les deux tempes en même temps.

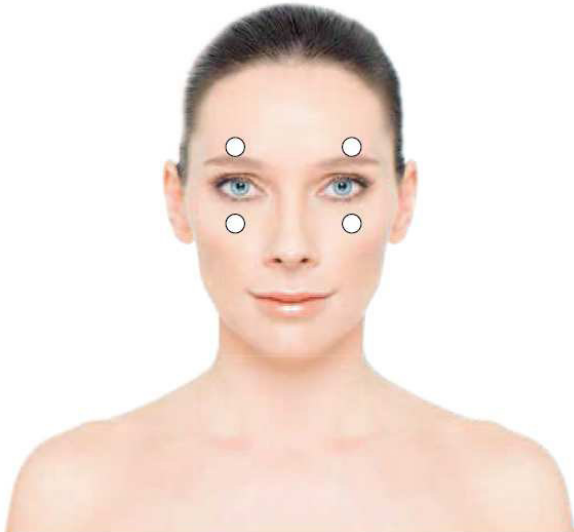

Ne placez pas les électrodes de part et d'autre des orbites oculaires.

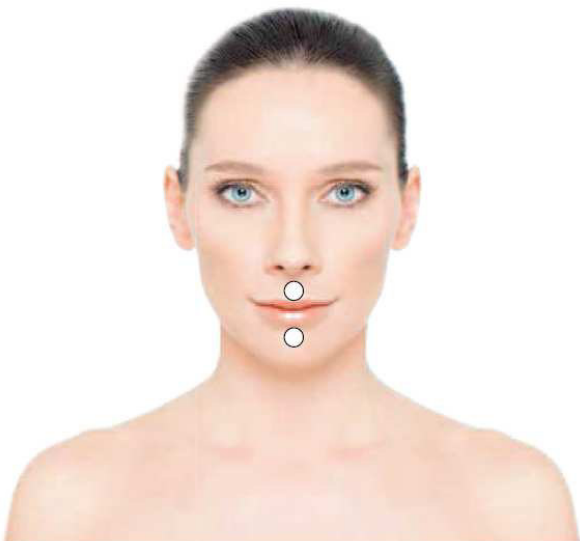

Ne placez pas les électrodes de part et d'autre de la bouche.